

Mare Nasen- spray

- Isotone Meersalzlösung
- Mit Meersalz und gereinigtem Wasser

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie Baby LUUF[®] Mare Nasenspray zum ersten Mal verwenden. Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts beachten sollten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was ist Baby LUUF[®] Mare Nasenspray und wann wird es angewendet?

Baby LUUF[®] Mare Nasenspray ist eine isotone Lösung bestehend aus natürlichem Meersalz und gereinigtem Wasser. Durch das spezielle Sprühsystem kann auf Konservierungsstoffe und Treibmittel verzichtet werden. Baby LUUF[®] Mare Nasenspray ist ein Medizinprodukt zur Befeuchtung trockener und gereizter Nasenschleimhaut. Es kann zur unterstützenden Behandlung einer Erkältung oder eines allergischen Schnupfens eingesetzt werden. Das Nasenspray hilft Symptome einer gereizten Nasenschleimhaut wie Niesen, verstopfte Nase oder Juckreiz zu lindern. BABY LUUF[®] Mare Nasenspray reinigt sanft die Nasenhöhlen und entfernt Verkrustungen. Schädliche Einflüsse von Allergenen und Feinstaub werden reduziert. Es unterstützt die Nasenschleimhaut in ihrer natürlichen Reinigungsfunktion gegen äußere Einflüsse wie Staub, Pollen, Viren und Bakterien. Durch das Ausspülen von Allergenen hilft das Spray dabei, Allergiesymptome zu reduzieren. Baby LUUF[®] Mare Nasenspray ist für Säuglinge und Kinder bis 6 Jahre geeignet.

Wie wird Baby LUUF[®] Mare Nasenspray angewendet?

Je nach Bedarf sollten Kinder über zwei Jahren mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße von Baby LUUF[®] Mare Nasenspray in jedes Nasenloch geben. Bei Säuglingen und Kindern unter zwei Jahren ist 1 Sprühstoß pro Nasenloch ausreichend. Säuglinge und Kinder, die das Produkt nicht selbstständig anwenden können, sollten bei der Verwendung von Baby LUUF[®] Mare Nasenspray Hilfestellung erhalten. Bevor Sie Baby LUUF[®] Mare Nasenspray zum ersten Mal anwenden, nehmen Sie die Schutzkappe ab und pumpen Sie 2-3-mal, um die Luft aus der Pumpe entweichen zu lassen. Schneiden Sie die Spitze des Sprühkopfes nicht ab. Wenn die Sprühfunktion beeinträchtigt ist (was passieren kann, wenn die Flasche nicht aufrecht gehalten wird), drücken Sie den Pumpmechanismus mehrmals in aufrechter Position.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe.
2. Umschließen Sie mit Ihrem Zeige- und Mittelfinger den Sprühkopf des Nasensprays und platzieren Sie den Daumen unter der Flasche. Lehnen Sie Ihren Kopf leicht nach vorne und halten ein Nasenloch mit der freien Hand zu.
3. Führen Sie die Spitze des Sprühkopfes vorsichtig in das freie Nasenloch ein und beginnen Sie, sanft einzuatmen.
4. Drücken Sie den Sprühkopf der Flasche zügig und fest nach unten, damit der Sprühnebel entweichen kann. Atmen Sie sanft durch das Nasenloch weiter ein.
5. Führen Sie die Spitze des Sprays nun in Ihr anderes Nasenloch ein und wiederholen die obigen Schritte.
6. Reinigen Sie den benutzten Sprühkopf mit einem sauberen und flusenfreien Tuch.
7. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei sachgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Baby LUUF® Mare Nasenspray erforderlich. Aus hygienischen Gründen sollte das Nasenspray nur von einer Person verwendet werden. Baby LUUF® Mare Nasenspray sollte bei Raumtemperatur verwendet werden.

Was ist bezüglich Haltbarkeit und Lagerung zu beachten?

Das Verfallsdatum von Baby LUUF® Mare Nasenspray ist auf der Faltschachtel und auf dem Etikett der Flasche aufgedruckt. Baby LUUF® Mare Nasenspray darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Baby LUUF® Mare Nasenspray sollte unter 25°C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Gegenanzeigen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Inhalt von Baby LUUF® Mare Nasenspray und weitere Informationen

20ml Lösung.

Ein Sprühstoß enthält 0,07 ml Lösung.

Das Nasenspray kann nach der ersten Anwendung 12 Monate lang verwendet werden.

Inhaltsstoffe

Natürliches Meersalz, gereinigtes Wasser

Datum der Information: April 2021



URSATEC GmbH, Marpinger Weg 4, 66636 Tholey, Germany

Vertrieb: Apomedica, 8010 Graz, Austria

Bedeutung der Symbole



CE Symbol



Hersteller



Temperatur-
grenzen



Chargen-
nummer



Anzuwenden
bis
(Verfalls-
datum)



Bitte
Gebrauchs-
anweisung
beachten



Nicht
anwenden,
wenn die
Verpackung
beschädigt
ist.